

Elemental Waterbath elemental®

- Διατηρεί το νερό στην ιδανική θερμοκρασία για να διαμορφώνετε το Elemental Granulate
- Εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη διαμόρφωση και την αναμόρφωση του Elemental Granulate
- Είναι μικρό σε μέγεθος, ιδανικό για τον πάγκο εργασίας σας



Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Elemental Waterbath

- Τοποθετήστε 100-150 ml νερού ή αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό στο Δοχείο Ανάμειξης και τοποθετήστε το στο Waterbath
- Γεμίστε το Waterbath με νερό έως 3cm από το χείλος του
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 90°C. Σε 6-7 λεπτά θα φτάσει στη σωστή θερμοκρασία
- Τοποθετήστε το Elemental Granulate μέσα στο Δοχείο Ανάμειξης για να το ζεστάνετε και να το προετοιμάσετε
- Όταν το υλικό γίνει μαλακό και διαμορφώσιμο, είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε

* Χρησιμοποιήστε το κουμπί «M» και επιλέξτε τη λειτουργία «Food».
Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 90°C χρησιμοποιώντας το κουμπί «+» και ξαναπατήστε τη λειτουργία «Food».



ariston dental
better answers